

Портативный анализатор уровня аммиака в цельной крови

- ✓ Диапазон измерения – 10-400N μ /dL (8-285 μ mol/L)
- ✓ Объем образца - 20 мкл
- ✓ Память – 50 результатов
- ✓ Работает от сети или батареек
- ✓ Высокая точность измерения, основанная на технологии «сухой химии»
- ✓ Отсоединяемый принтер



3 шага для получения результата

1. Нанести каплю крови на тест-полоску, нажать кнопку «Старт»
2. Через 180 секунд после сигнала зуммера снять верхнюю часть тест-полоски. Разместить тест-полоску в анализаторе
3. Через 20 секунд результат автоматически распечатывается на принтере

Уменьшение уровня аммиака в крови

Увеличение уровня аммиака в крови

Заболевания

Почечная недостаточность;
Злокачественная артериальная гипертензия; Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь)

Синдром Рея; Ацидоз; Печеночная недостаточность; Печеночная энцефалопатия и кома; Портокавальный анастомоз; Эритробластоз плода; Лёгочное сердце; Тяжелая застойная сердечная недостаточность; Высокобелковая диета (при печеночной недостаточности)

Влияние медицинских препаратов, других веществ

Антибиотики (Неомицин, Канамицин, Тетрациклин); Соли кальция и натрия; Ингибиторы моноаминоксидазы; Дифенгидрамин (Бенадрил);

Наркотики; Большое количество алкоголя; Гуанетидин; Адренокортикотропный гормон; Тиазидные диуретики; Салицилаты; Тетрациклин. Другие причины: Тренировки; Переедание.

Размером с ладонь и весом всего 150г, PocketChem BA изменит ваше представление об анализах и приблизит лабораторию к постели больного!