

ПРОГРАММА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ SARS-COV-2: RQ9193**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАБОРА И ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ**

Убедитесь, что в наборе присутствует правильное количество образцов, а также, что Ваши образцы соответствуют параметрам, указанным ниже в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА». Убедитесь, что ни один из флаконов не поврежден и немедленно уведомьте Вашего представителя «Рендокс» в случае любых несоответствий. В завершение, зайдите в личный кабинет на сайте www.riqas.net для подтверждения точной даты получения данного набора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Данная упаковка содержит 6 флаконов с жидкими образцами объемом 0,5 мл. Флаконы имеют этикетки, на которых указан номер образца.

ПОДГОТОВКА/ХРАНЕНИЕ/СТАБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗЦОВ

Контрольные образцы SARS-CoV-2 поставляются в жидкой форме, готовыми к использованию. Перед использованием необходимо довести образцы до комнатной температуры (20-25°C). Аккуратно перемешайте содержимое флакона до полной однородности перед взятием образца. Не взбалтывайте. Непосредственно после использования закройте флакон крышкой и храните при температуре 2-8°C. Проведите анализ образца в течение 2-х суток после вскрытия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Материал человеческого происхождения, SARS-CoV-2 подготовлен при помощи нагревания инактивированной человеческой плазмы. Материал был проверен на уровне доноров на ВИЧ (ВИЧ 1, ВИЧ 2), поверхностный антиген вируса гепатита В и гепатит С, и дал **ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ** результат. Данное тестирование было проведено по протоколам, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Однако, так как ни один из методов тестирования не дает полной гарантии отсутствия инфекционных агентов, обращаться и утилизировать данный материал и все образцы пациентов следует как потенциально опасные.

Только для использования IN VITRO.

* **ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Результаты исследований должны поступить в «РИКАС» не позднее 17:00 по Гринвичу (20:00 по МСК) **ФИНАЛЬНОЙ ДАТЫ** (дата окончания приема результатов). Если проведение анализа в **РЕКОМЕНДУЕМУЮ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА** не обеспечивает достаточное количество времени для отправки результатов, рекомендуется проводить анализ раньше, чтобы успеть отправить результаты до финальной даты.

ПРОГРАММА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ SARS-COV-2
ДАТЫ ОТПРАВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЦИКЛ 3В

НОМЕР ОБРАЗЦА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА	ФИНАЛЬНАЯ ДАТА
7	08.04.2024	15.04.2024
8	06.05.2024	13.05.2024
9	03.06.2024	10.06.2024
10	08.07.2024	15.07.2024
11	05.08.2024	13.08.2024
12	09.09.2024	16.09.2024

