

Программа внешней оценки качества «Скрининг беременности» RQ9137

Инструкция по применению

Подтверждение характеристик набора и даты получения

Пожалуйста, проверьте, что в наборе присутствует правильное число образцов, а также, что они соответствуют параметрам, указанным в разделе «**Характеристики набора**». Убедитесь, что ни одна из виал не повреждена и немедленно уведомьте Вашего представителя Randox в случае любых несоответствий. В завершение, зайдите на сайт www.riqas.net с использованием Вашей учетной записи и на главной странице пройдите по ссылке «**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ НАБОРА И ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ**» для подтверждения точной даты получения данного набора.

Характеристики набора: в течение цикла программы суммарно поставляется 12 образцов в двух упаковках. Материал поставляется дважды – по одной упаковке перед началом цикла и в его середине. Каждая упаковка содержит 6 виал с образцами, лиофилизированными с объема 1 мл и рассчитана на проведение внешней оценки качества в течение 6 месяцев. Данная упаковка содержит образцы 7-12. Виалы имеют этикетки, на которых указан номер образца (Sample) и цикл программы (Cycle).

Хранение

Образцы следует хранить при +2...+8° С.

Подготовка к анализу

Образцы упакованы под вакуумом. Осторожно откройте крышку виалы, и особенно – резиновую пробку, избегая потери материала. Используя откалиброванную пипетку (автоматический дозатор), добавьте точно 1 мл свежей бидистиллированной или деионизированной воды с температурой +20...+25° С. Закройте виалу резиновой пробкой и затем крышкой и оставьте на 30 минут в стороне от яркого света. Убедитесь, что лиофилизированное содержимое полностью растворилось, аккуратно вращая виалу. Не встряхивать виалу во избежание образования пены! После разведения анализ образца необходимо провести в течение 2-х суток. Образцы RIQAS следует тестировать также как образцы пациентов.

Безопасность

Образцы RIQAS изготовлены на основе человеческой сыворотки крови. Источник был проверен на отсутствие поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) и антител к ВИЧ. Однако для полной защиты рекомендуется при работе с сывороткой применять такие же меры безопасности, как и при работе с образцами пациентов.

Только для использования in vitro. Не пипетировать ртом!

* **Важное замечание:** результаты исследований должны поступить в RIQAS не позднее 17:00 по Гринвичу (19:00 по Мск в летнее время, 20:00 – зимнее) финальной даты, указанной в календаре отправки результатов (см. ниже). Если проведение анализа в рекомендуемую дату невозможно, следует делать это раньше, чтобы успеть отправить результаты до финальной даты. В случае отсутствия объективной возможности отправить результаты самостоятельно, Вы можете отправить их через официального представителя Randox в России – ООО «Эко-мед-с М». При этом результаты необходимо передать не позднее чем за 3 рабочих дня до финальной даты. **Обратите внимание:** результаты, присланные после финальной даты по вине участника, не могут быть приняты (см. правила RIQAS).

Календарь отправки результатов. Цикл 9В

Номер образца	Рекомендуемая дата проведения анализа	Финальная дата отправки результатов в RIQAS*
7	10.07.17	17.07.17
8	14.08.17	21.08.17
9	11.09.17	18.09.17
10	09.10.17	16.10.17
11	13.11.17	20.11.17
12	11.12.17	18.12.17